

Опоры-ходунки с принадлежностями:

Опоры-ходунки:

арт. 10184.

арт. 10185-ВА.

арт. 10188 (высота 65-82см; высота 82-94 см).

арт.10189.

арт.Quick.

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	4
1.3 Упаковка.....	5
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	6
2.1 Важные предупреждения.....	5
2.2 Порядок работы.....	6
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	7

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик опор-ходунков 10184, 10185, 10188, 10189, Quick (XXL).

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Опоры-ходунки 10184, 10185, 10188, 10189, Quick (XXL) предназначены для облегчения передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и координации движения.



10184



Quick (XXL)



10185-BA



10188




10189

1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
механизм	складной	все модели
материал	алюминий	все модели
конструкция	“без шага”	10184, 10185-BA, Quick(XXL)
	“с шагом”	10188, 10189
фиксирующий замок	одинарный	10188, 10189, 10184
	двойной	10185-BA, Quick(XXL)
особенность	усиленный корпус	10185-BA, Quick(XXL)
	с подмышечными опорами	10189
	на колесах	Quick(XXL)
производство	Тайвань (Китай)	все модели
гарантия	6 мес.	все модели

1.3 Упаковка

В комплектации: ходунки,
руководство по эксплуатации.

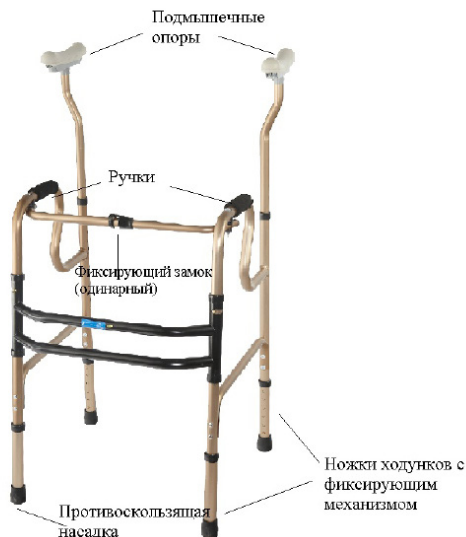

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на 10184, 10188, 10189 - 120 кг; на 10185-BA, Quick (XXL) - 225 кг.

2.2 Порядок работы

Ходунки продаются в собранном виде.

Инструкция по сборке опор-ходунков арт. 10184 изложена на индивидуальной упаковке

1. Вытащите изделие из коробки.
2. Поверните обе стороны ходунков, пока не услышите характерный щелчок.
3. Отрегулируйте высоту ходунков. Убедитесь, что ножки ходунков находятся на одинаковой высоте. Медные фиксирующие шарики должны полностью выскочить из отверстий.
4. Чтобы сложить ходунки, необходимо нажать на фиксирующий замок и повернуть обе стороны ходунков внутрь.

Расположите ходунки на желаемой дистанции от вас. Используя свои руки как опоры, подойдите ближе к раме ходунков. Не подходите слишком близко к передней раме ходунков, это может нарушить равновесие. Медленно передвигайтесь вперед мелкими шагами.

Чтобы сесть, отодвиньтесь назад, пока ваши ноги не коснутся сиденья. Одной рукой нащупайте сиденье, а другой держитесь за ходунки.

Чтобы встать из положения сидя, оттолкнитесь руками от сиденья и затем возьмитесь за ходунки.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр.5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Опоры-ходунки 10184, 10185, 10188, 10189, Quick (XXL).

Производитель: "Валентайн Интернейшнл Лтд", Тайвань, Китай. Valentine International Ltd, 8th Floor, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd.221 Hsichin City, Taipei Hsien, Taiwan, China

РУ от 21.06.2011 №ФСЗ 2011/09870

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская, д. 16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

**Более подробная информация на сайте www.sims2.ru