



Доска для пересадки

10460



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
2.1 Важные предупреждения.....	3
2.2 Порядок работы.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик доски для пересадки 10460.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Доска для пересадки 10460 предназначена для пересадки (транспортировки) людей с ограниченной подвижностью с кресло-коляски на кровать или стул и обратно.

1.2 Технические характеристики

цвет	белый
материал	пластик
габариты (см)	70x3x20
вес изделия (кг)	1
особенности	резиновые вставки для предотвращения скольжения

1.3 Упаковка

Комплектация: доска для пересадки.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте изделие на наличие трещин!

Максимальная нагрузка: 100 кг

2.2 Порядок работы:

Для правильной эксплуатации, пожалуйста, ознакомьтесь с рисунками.

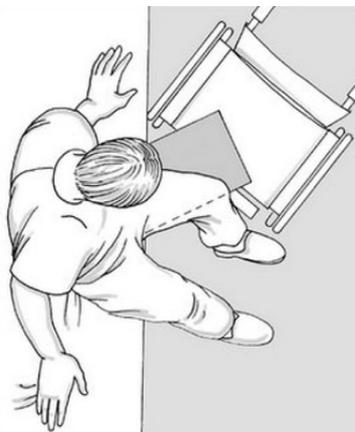


Рис.1 Пересадка с кровати на кресло-коляску или стул самостоятельно.



Рис 2. Пересадка с кровати на кресло-коляску или стул при помощи сопровождающего лица.

3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Свободы, д.35, стр.5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Доска для пересадки 10460

Производитель: Valentine International Ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Для заметок