



Средства для самообслуживания и ухода
за инвалидами: насадки на унитаз:
арт. 10527L. арт. 10528. арт. 10528А. арт.
10528А/Т. арт. 10540. арт. 10545.



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	5
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	5
2.1 Важные предупреждения.....	5
2.2 Руководство по сборке.....	5
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	6

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик насадок на унитаз 10528; 10528А; 10528А/Т; 10527L; 10545; 10540.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Насадки на унитаз являются медицинским устройством, которое увеличивая высоту санитарного устройства, облегчают пользование туалетом людям после перенесенных травм, операций, а также инвалидам разных категорий. Насадки увеличивают высоту унитаза, что способствует оптимальному положению пациента и обеспечивают ему комфорт. Насадки выполнены из белого прочного и легко моющегося полиэтилена. Они подходят на унитазы любой формы и не требуют специального инструмента.

1.2 Технические характеристики

Для получения более подробных характеристик стоит обратиться к сайту: sims2.ru.

Модель (артикул)	10528А	10528	10528А/Т	10527L	10545	10540
Максимальная нагрузка, кг	115	115	115	115	115	100
Масса, кг	2,7	2	1,4	1,4	1,6	4,0
Увеличение высоты унитаза, см	12	12	12	12	8-12	
Материал	гигиенический, ударопрочный пластик	гигиенический, ударопрочный пластик	гигиенический, ударопрочный пластик	гигиенический, ударопрочный пластик	гигиенический, ударопрочный пластик	анодированный алюминий

Модель (артикул)	10528A	10528	10528A/T	10527L	10545	10540
Габариты, см (ШхГ)	53x41	41x41	34x40	35x39	38x40 см (внешние) 22x24 см (внутренние)	Высота: 61-79 см ширина/глубина: 46-54x43 см
Особенности	Съемные ручки		Съемные алюминиевые поручни с мягкими валиками, увеличенное расстояние между поручнями	Крышка	Защита от брызг, возможность регулировки по высоте	Регулируемое расстояние между поручнями, регулируемая высота поручней

1.3 Упаковка

В комплектации: Насадка на унитаз, поручни (кроме моделей 10545, 10527L, 10528), винты (только с моделью 10528А/Т), крепежные элементы (только с моделью 10540).

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.

2.2 Руководство по сборке.

Модель 10540.

Внимание: измерьте параметры Вашего унитаза и отрегулируйте ножки по ширине так, чтобы они подходили к Вашему унитазу.

Для установки поручней снимите с унитаза сиденье с крышкой.

1) Деталь №1 зафиксируйте к корпусу унитаза крепежными элементами сиденья.



Деталь №1

2) Посредством кнопочного замка на ножках совместите поручни с отверстиями детали №1 до щелчка, два положения замка позволяют регулировать ширину поручней.

3) Посредством кнопочного замка на телескопических ножках отрегулируйте высоту поручней.

Модель 10528А/Т.

Прикрепите поручни к нижней части насадки на туалет с помощью винтов.

Модель 10528А.

Посредством кнопочного замка совместите поручни с отверстиями насадки на туалет до щелчка.

3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте изделие на наличие трещин и поломок.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати,
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Насадки на унитаз 10528; 10528А; 10528А/Т; 10527L; 10545; 10540.
Производитель: “Валентайн Интернейшнл Лтд” Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15
по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

**Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Для заметок