



Вспомогательная ступенька 10222

Вспомогательная ступенька с ручкой 10222Н



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
\1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик вспомогательной ступеньки 10222 и вспомогательной ступеньки с ручкой 10222Н.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Данные изделия предназначены для использования в качестве вспомогательной ступеньки. Вспомогательная ручка служит для поддержания равновесия.

1.2 Технические характеристики

Характеристики	10222	10222Н
материал	сталь, резина	сталь, резина
высота (см)	24	86
ширина (см)	35	35
глубина (см)	42	45
вес изделия (кг)	2,4	3,7

1.3 Упаковка

Комплектация модели 10222: ступенька, руководство по эксплуатации.

Комплектация модели 10222Н: ступенька с ручкой , руководство по эксплуатации.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте все части на наличие трещин!

Ни в коем случае не облакачивайтесь всем весом на ручку.

Это может привести к опрокидыванию и серьезным повреждениям.

Максимальная нагрузка: 120 кг.

2.2 Порядок работы:

Данное изделие поставляется в собранном виде и не требует сборки.

3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами.

Во избежание возникновения коррозии, тщательно высушите обработанную поверхность.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Свободы, д.35, стр.5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Вспомогательная ступенька 10222

Вспомогательная ступенька с ручкой 10222Н

Производитель: Valentine International Ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10,
пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Информационное письмо

Исх. № 121/11-2013 от 15.11.2013 г.

Для заметок