



# Поднос для кресел-колясок mediQ 10858


Перед началом эксплуатации, пожалуйста, проверьте все части на наличие трещин!

## Инструкция по сборке.


1. Откройте коробку и убедитесь в комплектности.



2. Закрепите зажим-фиксатор на раме в вертикальном или горизонтальном положении. Закрутите Болт А с помощью шестигранного ключа.

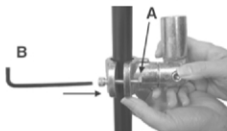

3. Расположите зажим-фиксатор в вертикальном положении и закрепите винты с помощью шестигранного ключа в двух местах (А и В).

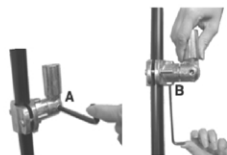


4. Вставьте алюминиевые трубки в зажим-фиксатор до желаемой высоты. В комплект поставки входят три трубки, но не обязательно все три устанавливать.

5. Вставьте Е-образную клипсу в отверстие, через которое перекрещиваются трубки. Установите крючок и подстаканник, продев О-образное кольцо над и под подстаканником.



Высота: варьируется в зависимости от модели коляски  
Ширина: 25 см  
Глубина: 30 см  
Габариты упаковки:  
Вес без упак.: 1,4 кг  
Вес с упак.: 1,6 кг  
Комплектация: поднос, картонная упаковка  
Материал: поднос - пластмасса, крепления - алюминий

6. Установите в одно из двух отверстий на столешнице на трубку. На столешнице находятся 2 отверстия для право или левостороннего расположения.

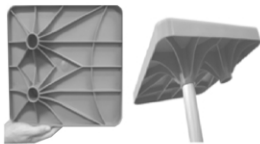

- Столик не предназначен для изменения положения и передатки в/из коляски
- Изделие не может выдержать нагрузку всего веса пользователя
- Не ставьте горячие напитки в подстаканник.
- Не пользуйтесь столиком, если не все части надежно закреплены.

## Инструкция по уходу.

Уход за следует проводить водой и не абразивными чистящими средствами.

## Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6, к.7  
Тел: (495) 792-31-90

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штампа  
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

(подпись покупателя) \_\_\_\_\_

Орган сертификации: рес. № Росс RU.001.11AM36, «ТЕСТ-ГРУПП», 121099 Чдсс.ва. 1-й Смоленский переулок, д.2, офис 402  
Тел: (499) 2480302; (499) 2484610  
Иск № 499-02/10, Дата выдачи: 10.11.2010 г.  
Произведено для: Valente International LTD, Тайвань (Китай),  
9-th Fl, №149, Sec. 2, Ta Tung Rd, 221 Hsi-chih City, Taipei Hsein, R.O.C.  
Поставщик: ООО «СИММ-2», Россия, 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6, корп. 7

