



Велотренажер для рук и ног

Barry 24397/PR

Barry 24398/P/R

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
2.1 Важные предупреждения.....	3
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	6

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия велотренажеров Barry 24397/PR, Barry 24398/P/R. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Складной компактный тренажер для разработки верхних и нижних конечностей. С помощью регулятора сопротивления имеется возможность увеличивать или уменьшать нагрузку по желанию пользователя. Незаменим при проведении реабилитации для больных, перенесших инсульт; после травм спинного мозга; различных ортопедических нарушений; страдающих рассеянным склерозом, дцп, болезнью паркинсона; после переломов конечностей.

1.2 Технические характеристики

243987/PR

- Вес: 2,50 кг
- Габариты: 39x40x20 см

24398/P/R

- Вес: 2,60 кг
- Габариты: 39x40x20

1.3 Упаковка

243987/PR

В коробке: тренажер, руководство по эксплуатации.

24398/P/R

В коробке: тренажер, шагомер, руководство по эксплуатации.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Проверяйте болты после каждого использования велотренажера, по необходимости затягивайте туго болты.
- Металлические составляющие могут нагреться во время тренировок.
- Не вставляйте на тренажер.

- Перед использованием велотренажера проверьте все кнопки.
- Пользователи с тяжелой формой инвалидности или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно без помощи вспомогательных средств, не должны использовать изделие без сопровождающего лица.

2.2 Порядок работы

Шаг 1.

Разложите ножки тренажера. Убедитесь, что кнопки для сборки на каждой ножке тренажера защелкнулись в том месте, где складываются ножки тренажера.

Шаг 2.

Покрутите винт, регулирующий уровень сложности против часовой стрелки для снижения уровня сложности или покрутите винт по часовой стрелке для повышения уровня сложности.

Шаг 3.

Для того, чтобы сложить тренажер необходимо нажать на те же кнопки и сложить ножки тренажера по направлению к раме тренажера.

В случае, если вы используете тренажер как велотренажер для ног:

1. Сядьте на устойчивую поверхность (стул, кровать и т.д.);
2. Разложите тренажер и положите его перед собой на устойчивую, ровную и противоскользящую поверхность;
3. Настройте тренажер (для этого необходимо покрутить винт);
4. Начните медленно крутить педали;
5. Крутите педали небольшими периодами, постепенно увеличивая скорость;
6. Держите осанку ровно, пока крутите педали (спина и шея должны быть прямыми);
7. Дышите ровно.

В случае, если вы используете тренажер как велотренажер для рук:

1. Прodelайте те же действия, но тренажер положите на стол.

Использование шагомера

1. Показатель “SCAN”: нажмите на кнопку “Mode”, чтобы выбрать “SCAN”. После этого данная функция будет автоматически сканировать все функции, отображающиеся на нижней строке дисплея шагомера .
2. Показатель “TIME”: автоматически складывает отработанное время с момента начала тренировки.
3. Показатель “CNT”: автоматически суммирует количество тренировок с момента начала тренировок.
4. Показатель “TOT.CNT”: автоматически суммирует различные сеансы количества тренировок с момента начала тренировок.
5. Показатель “CALS”: автоматически суммирует затрачиваемые калории с момента начала тренировок.
6. Функциональная кнопка: нужна для того, чтобы выбрать функции “TIME”, “CNT”, “TOT.CNT”, “CALS”. Удерживайте кнопку в течение 4 секунд, чтобы сбросить все функции.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Как только заметите неверные результаты, отображенные на дисплее, поменяйте батарейки в шагомере. Используйте 1,5V батарею .
- Дисплей автоматически выключится, если в течение 4-5 минут не произведется никаких действий.
- Дисплей автоматически включится, если вы начнете тренировку или нажмете на кнопку.
- Все функции автоматически перестанут калькулировать, когда в левом верхнем углу дисплея появится надпись “Stop”, в том случае, если не будет никаких сигналов в течение 4 секунд. Когда надпись “Stop” исчезнет с дисплея, прибор автоматически начнет калькуляцию.
- Прибор начнет калькулировать, если вы начнете тренировку и автоматически перестанет калькулировать, если вы перестанете выполнять упражнения в течение 4 секунд.

3. Техническое обслуживание

Раму и педали тренажера можно чистить мягкой, слегка увлажненной тканью. Затем протереть сухой тряпкой во избежание появления ржавчины. Не используйте жесткие очищающие средства и не погружайте изделие в воду.

Замените батарейки типа ААА, в случае, если дисплей перестанет отчетливо показывать данные.

Держите тренажер в сухом месте. Накройте изделие во избежание накопления пыли.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес сервисного и гарантийного центра, уполномоченного на ремонт и замену оборудования, указан на сайте sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Орган по сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11АГ13, ООО "РСТ-Групп", РФ,
141315, Московская область, г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д.20А



Велотренажер для рук и ног Barry 24397/PR, Barry 24398/P/R
Производитель: Valentine International LTD, Тайвань (Китай), 8-th Fl, №149, Sec 2, Ta
Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Тел./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90;
www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

Для заметок