



Инструкция по эксплуатации

**XR** 202

## Описание

Средство реабилитации для инвалидов: ходунки Ortonica XR 202 (далее по Руководству - ходунки) - приспособление для передвижения людей с нарушением опорно-двигательной системы и пожилых людей в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием, улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

Ходунки изготовлены из металла, имеют высококачественное эмалевое лакокрасочное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента.

Ходунки оснащены мягким сиденьем с ручкой для складывания, полукруглым мягким упором для спины и корзиной для личных вещей.

Рукоятки регулируются по высоте, обеспечивают прочность их захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате, оснащены ручными тормозами, обеспечивающими подтормаживание при движении и фиксацию при использовании для отдыха сидя.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования, не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

## Показания

- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы.
- Умеренные и выраженные явления гемипареза.
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

## **Противопоказания**

- Психические расстройства.
- Потеря функциональности обеих рук.
- Нарушения статики и координации движения.
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

## **Меры предосторожности**

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками.
- Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться.
- Не ходите по мокрому или скользкому полу.
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности.
- Ходунки нельзя тянуть на себя, поднимаясь с кресла или кровати.
- Нельзя использовать ходунки при головокружении.
- Нельзя подходить слишком близко или вплотную к ходункам.
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку.
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, а не под ноги.

## **Технические параметры**

| Параметры                         | XR 202          |
|-----------------------------------|-----------------|
| Габариты (ДхШхВ),<br>(± 1 см)     | 69x63x81,5-96,5 |
| Ширина между ручками,<br>(± 1 см) | 49              |

|   |           |
|---|-----------|
| Параметры                                     | XR 202    |
| Высота до сиденья,<br>(± 1 см)                | 55,5      |
| Диаметр колес (передние/<br>задние), (± 1 см) | 20,5/20,5 |
| Размер сиденья, (± 1 см)                      | 31x36     |
| Количество уровней<br>регулировки высоты      | 8         |
| Шаг регулировки высоты,<br>см                 | 2,5       |
| Грузоподъемность,<br>(± 5%), кг               | 110       |
| Масса (нетто/брутто),<br>(± 5%), кг           | 8,2/9,15  |
| Габариты упаковки,<br>(ДхШхВ) (± 1 см)        | 57x19x54  |
| Количество штук<br>в упаковке                 | 1         |

*\*Данные размеры приведены справочно и могут быть изменены без согласования с потребителем. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инвалидной коляски, не ухудшающие ее потребительских свойств.*

## **Подготовка к эксплуатации**

1. Раздвиньте раму.
2. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоз, отрегулируйте высоту ручек, отрегулируйте высоту опоры для спины.

## **Очистка**

Производите дезинфекцию ходунков в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности ходунков обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными

протираются дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

## **Правила хранения и транспортировки**

Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Ходунки транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение ходунков без упаковки завода-изготовителя не гарантирует их сохранность. Повреждения, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

Ходунки не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации. Утилизация ходунков осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

## **Комплектация**

- Ходунки 1 шт.;
- Сумка 1 шт.;
- Болты-барашки 2 шт.;
- Полукруглый упор 1 шт.;
- Руководство 1 шт.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Предприятие-изготовитель система-

ков, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

## **Сведения о сертификации**

Средства реабилитации для инвалидов: ходунки Ortonica XR 202 соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4717

Производитель: «Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Dali, Nanhai District, 528234 Foshan, Guangdong, China

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части гарантия не распространяется.

Сервисное обслуживание изделий производится в ООО "Реамед".

Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект, д.42

Контактный телефон: 8 (473) 300-31-91; 300-31-51

| Дата продажи | Подпись продавца / Поставщика |
|--------------|-------------------------------|
|              |                               |



8 800 500-14-14

[ortonica.ru](http://ortonica.ru)