



Подголовник для мытья головы

61016



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА..... | 3 |
| 1.1 Назначение..... | 3 |
| 1.2 Технические характеристики..... | 3 |
| 1.3 Упаковка..... | 3 |
| 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ..... | 3 |
| 2.1 Важные предупреждения..... | 3 |
| 2.2 Порядок работы..... | 4 |
| 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 4 |
| 4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ..... | 5 |
| Приложение 1. Декларация о соответствии..... | 7 |

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик подголовника для мытья головы 61016.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Надувной подголовник 61016 помогает мыть голову, не намачивая другие части тела.

1.2 Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| цвет | белый |
| материал | винил |
| длина в надутом состоянии (см) | 60 |
| ширина в надутом состоянии (см) | 60 |
| высота в надутом состоянии (см) | 15 |
| особенность | снабжен сливным шлангом |

1.3 Упаковка

Комплектация: подголовник, сливной шланг, руководство по эксплуатации.

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

Перед началом использования, убедитесь, что изделие находится в рабочем состоянии.

2.2 Порядок работы:

1. Надуйте подголовник для мытья головы с помощью насоса (не включен в базовую комплектацию) или с помощью рта.
2. Положите подголовник под голову пользователя.
3. Поместите конец сливного шланга в водонепроницаемый пакет для слива.
Заметка: убедитесь, что пакет для слива находится ниже подголовника. На нижней части подголовника имеется пробка сливного отверстия.
4. Намочите волосы, нанесите шампунь, а затем тщательно прополощите волосы.
5. Уберите подголовник после того, как вся вода выльется из подголовника.
6. После использования прополощите подголовник и высушите его. Оставьте подголовник в надутом состоянии в течение нескольких часов. Убедитесь, что он полностью высох. Затем сложите его и уберите в коробку, которая предназначена для подголовника.

3. техническое обслуживание

После использования прополощите подголовник и высушите его. Оставьте подголовник в надутом состоянии в течение нескольких часов. Убедитесь, что он полностью высох. Затем сложите его и уберите в коробку, которая предназначена для подголовника.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати,
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Подголовник для мытья головы 61016

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

125363, г. Москва, ул. Свободы, д.35

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

| | |
|----------------|--|
| Серийный номер | |
| Дата продажи | |

Подпись продавца _____

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «СИМС-2»

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонной инспекция МНС России № 39 по г. Москве 23.10.2002,
ОГРН 1027739438902

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

125363, г. Москва, ул. Новоселковская, д. 6. Телефон: 792-31-90

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Бадаляна С.П.

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Изделия хозяйственно-бытового назначения из полимерных материалов: подголовник для мытья головы, арт.: 61016.

Договор № 62 от 26.07.2006 г.

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

Код ОК 005-93: 22 9310

Код ТН ВЭД России: 3926 90 970 9

Серийный выпуск.

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,

Изготовитель «VALENTINE INTERNATIONAL LTD»

наименование изготовителя,

8-th FL, № 149, Sec 2, Ta Tung Road 221, Hsichin City, Taipei Hsien, Taiwan R.O.C., Тайвань (Китай)

страны и т.п.)

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50962-96 Пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 7, 11), 3.9

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

Протокола испытаний № 76/тг от 04.06.2014 г.

ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ22 от 29.08.2011 до 05.04.2015

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 05.06.2014

Декларация о соответствии действительна до 04.06.2017



М.П.

С.П. Бадалян

подпись

Бадалян С.П.

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОСП "РСТ-Групп"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Московское ш. д. 20 а, г. Сергиев Посад, Московская обл. Телефон (985)-220-65-69

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ13 выдан 13.12.2010 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 05.06.2014, **регистрационный номер** РОСС TW.АГ13.Д01302

дата регистрации и регистрационный номер декларации



М.П.

А.В. Беляков

подпись

А.В. Беляков

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

Для заметок