

# МЕТ RS-300 Strong

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подвес-гамак универсальный для подъемника №4



\*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

## 1. Предназначение

Подвес-гамак для инвалидного подъёмника (далее – изделие) предназначен для комфортного перемещения пациента. Применяется для оснащения подъёмников при необходимости жесткой поддержки спины больного.



Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте паспорт изделия перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять паспорт изделия в течение всего срока эксплуатации.



Внимание! Перед каждым использованием необходимо провести внешний осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений и надежности крепления и целостности других деталей изделия. При наличии недостатков эксплуатацию изделия необходимо прекратить и принять меры по их устранению.

## 2. Технические характеристики

Материал	водонепроницаемый нейлон
Материал жёстких вставок	пластик
Допустимая нагрузка	200 кг

## 3. Описание изделия

3.1. Подвес-гамак для инвалидного подъёмника изготовлен из водонепроницаемого нейлона.

3.2. Изделие снабжено жёсткими пластиковыми вставками, дополнительно поддерживающими естественный люмбальный изгиб позвоночника.

## 4. Уход за изделием

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, соблюдайте следующие рекомендации:

- Избегайте контактов изделия с колюще-режущими предметами во избежание проколов и порезов.
- Регулярно производите гигиеническую обработку изделия мыльным или неагрессивным дезинфицирующим раствором.
- При очистке изделия используйте только безопасные для кожи обеззараживающие средства.
- Запрещается стирать изделие в стиральных машинах всех типов.

## 5. Транспортировка, хранение и утилизация изделия

- При транспортировке в оригинальной упаковке, подвес должен быть зафиксирован в транспортном средстве, исключая смещение в процессе перевозки. Запрещается перевозить изделие вместе с колюще-режущими и другими предметами, которые могут стать причиной механических повреждений изделия.
- При длительном хранении изделие должно находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ.
- Для снижения вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду, руководствуясь официальными документами регионального значения, необходимо принять меры по утилизации оборудования по истечении срока эксплуатации, предварительно приняв меры по обеспечению безопасности.

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

**Гарантия не распространяется на следующие неисправности:**

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель \_\_\_\_\_

Срок гарантии: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ м.п.

Продавец: \_\_\_\_\_