

141013, Россия, Московская область,  
г. Мытищи, 1-ый Силикатный переулок, строение 14Б/4, каб 13

тел.+7(495)211 41 41

### КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС» КМ02

ТУ 32.50.30-001-86677278-2017, Регистрационное удостоверение №РЗН 2019/8423

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» КМ02 (далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических процедур.

1.1 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры

2.1.1 Габаритные размеры КМ02 (205x65x52) мм, ±10 мм.

2.1.2 Масса не более 18 кг.

2.2. Характеристики:

2.2.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 150 кг

2.2.2 Кушетка состоит из двух секций – подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от -35 до 35 градусов

2.2.3 Подголовник и ложе изготовлены из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованные винил кожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.

2.2.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм

2.2.5 Каркас кушетки имеет защитное покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожара-безопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания

2.2.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2

2.2.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

2.2.8 Средний срок службы кушетки до списания не менее 6 лет

#### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки изделия:

Подголовник(мягкая часть)	1 шт
Ложе(мягкая часть)	1 шт
Каркас подголовника в сборе	1 шт
Ножки в сборе	2 шт
Поперечная тяга	3 шт
Растомат	2 шт
Болт М10х50	6 шт
Болт М8х50	2 шт
Болт М8х45	2 шт
Гайка самоконтр М8	4 шт
Шайба 10	6 шт
Шайба 8	6 шт
Шайба 8 пластиковая	2 шт
Саморез 4х16	22 шт
Заглушка 30х15	4 шт
Заглушка 25Х25	2 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт

141013, Россия, Московская область,  
г. Мытищи, 1-ый Силикатный переулоч, строение 14Б/4, каб 13

тел.+7(495)211 41 41

#### 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Кушетки состоят из каркаса, ложа и подголовника
- 4.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения
- 4.3 Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от -35° до 35°

#### 5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 К сборке кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящую инструкцию, конструкцию изделия и правила эксплуатации

#### 6 ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 6.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 6.3 Проверить комплектность
- 6.3 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

#### 7 ПОРЯДОК СБОРКИ

- 7.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящей инструкции
- 7.2 Осуществить сборку согласно инструкции

#### 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

#### 9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 9.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 9.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 9.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.
- 9.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 9.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.
- 9.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

#### 10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.
- 9.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.
- 9.3 Расчетный срок службы изделия – 10 лет.
- 9.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.
- 9.5 Гарантия утрачивает силу, если:
  - поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
  - повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
  - неуполномоченной стороной
- 9.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.
- 9.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- 9.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

**141013, Россия, Московская область,  
г. Мытищи, 1-ый Силикатный переулок, строение 14Б/4, каб 13**

**тел.+7(495)211 41 41**

**11 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» КМ02

Дата продажи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата ремонтных работ(замены) \_\_\_\_\_

Производитель

Заказчик

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

141013, Россия, Московская область,  
г. Мытищи, 1-ый Силикатный переулоч, строение 14Б/4, каб 13

тел.+7(495)211 41 41

**КУШЕТКА КМ-02, КМ-03**  
инструкция по сборке

КРЕПЕЖ	
Наименование	Кол-во, шт.
болт M10x50	6
болт M8x50	2
болт M8x45	2
гайка самоконтр. M8	4
шайба 10	6
шайба 8	6
шайба 8 пластиковая	2
саморез 4x16	22
заглушка 30x15	4
заглушка 25x25	2
растопат	2

