

## КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС» С01izm

ТУ 5620-001-866772, Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8423

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» С01izm (далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10 °С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1 Основные параметры и размеры
  - 2.1.1 Габаритные размеры С01izm (205х65х75) мм, ±10 мм.
  - 2.1.2 Масса не более 30 кг.
- 2.2. Характеристики:
  - 2.2.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 300 кг.
  - 2.2.2 Кушетка состоит из двух секций – подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от -35 до 35 градусов
  - 2.2.3 Подголовник и ложе изготовлены из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованы винилкожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.
  - 2.2.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
  - 2.2.5 Каркас кушетки имеет защитно покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания
  - 2.2.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
  - 2.2.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
  - 2.2.8 Средний срок службы кушетки до списания не менее 6 лет

**3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 3.1 Кушетки состоят из цельносварного каркаса, ложа и подголовника, с возможностью регулировки высоты кушетки от 65 см до 90 см
- 3.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных труб круглого и прямоугольного сечения.
- 3.3 Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от -35° до 35°

**4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

- 4.1 К эксплуатации кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее инструкцию, конструкцию изделия и правила эксплуатации

**5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

- 5.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 5.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 5.3 Проверить комплектность
- 5.3 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей(1-3% раствор хлорамина)

**6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 6.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

**7 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 7.1 Кушетки в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С
- 7.2 Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих взаимодействие атмосферных осадков и агрессивных сред, воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла

**8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящей инструкции
- 8.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня поставки потребителю.
- 8.3 Расчетный срок службы изделия – 10 лет. Фактический срок службы зависит от характера и интенсивности использования изделия и определяется предельным состоянием. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления работоспособного состояния, несоответствие установленным техническим требованиям
- 8.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износу, затвердение и появление трещин на поверхности.
- 8.5 Гарантия утрачивает силу, если:
- поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
  - повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
  - неуполномоченной стороной
- 8.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.
- 8.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- 8.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

**9 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» С01izm

Дата продажи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата ремонтных работ(замены) \_\_\_\_\_

Представитель  
предприятия-изготовителя

Владелец

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_