

## 8. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель \_\_\_\_\_

Срок гарантии: \_\_\_\_\_ 12 месяцев \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ м.п.

Продавец: \_\_\_\_\_



## Инструкция по эксплуатации противопролежневой системы



MET BASIC

MET AIR WC-100



MET AIR WC-200

## 1. Показания к применению

Данные модели противопролежневых систем предназначены для лечения и профилактики пролежней средней и высокой степени риска у пациентов с различными заболеваниями и травмами, сопровождающимися вынужденным длительным неподвижным положением тела.

## 2. Комплект поставки

- матрас трубчатого типа – 1 шт.;
- компрессор – 1 шт.;
- двоянная соединительная трубка – 1 шт.;
- чехол – 1 шт.

## 3. Противопоказания

- при шейных и скелетных вытяжениях;
- при нестабильных травмах спинного мозга;
- незажившие швы и раны.

## 4. Принцип работы

Компрессор нагнетает воздух в камеры матраса поочередно, в задаваемом ему ритме. Давление и нагрузка на поверхность тела лежачего пациента постоянно изменяется, благодаря чему нормализуется кровообращение, что способствует предотвращению проявления пролежней.

## 5. Рабочие условия окружающей среды

Температура: 5 – 40 С°

Относительная влажность воздуха: 15-85 %

Параметры электросети: 220 В

## 6. Инструкция по эксплуатации

Разложите матрас на кровать и застелите его простыней. Поместите компрессор под ножной секцией кровати. Подключите компрессор к электросети, после этого включите компрессор кнопкой 1 (см. рис.). Отрегулируйте давление воздуха рычагом 2(см. рис.), в соответствии с требованием пользователя.



## 7. Указания по технике безопасности

- Если во время работы компрессора возникает ненормальная ситуация, например громкий шум или странный запах, немедленно отключите прибор от электросети.
- Людям весом больше 135 кг не рекомендуется пользоваться матрасом.
- Людям, недавно перенесшим операцию и с не зажившими швами или ранами, не разрешается пользоваться матрасом.
- Держите надувной матрас вдали от острых предметов.
- Храните изделие вдали от открытого огня и любых нагревательных поверхностей, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.
- Регулярно производите гигиеническую обработку матраса мыльным или неагрессивным дезинфицирующим раствором.
- Храните матрас в сложенном виде, в сухом проветриваемом помещении.
- Матрас должен использоваться только по назначению врача.