

Кресло-коляска для инвалидов

МЕТ МК-300

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



Кресло-коляска для инвалидов МЕТ МК-300

предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску для инвалидов МЕТ МК-300 в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого рукояток.

Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло-коляску собственными силами. Для парковки используется стояночный тормоз.

Соблюдайте требования безопасности и технические характеристики.

При соблюдении целевого назначения, требований безопасности и технических характеристик при использовании кресла-коляски какой-либо риск отсутствует.

1. Показания

Постоянные или временные нарушения опорно-двигательного аппарата:

- паралич;
- ампутации органов;
- повреждения или деформация органов;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

2. Противопоказания

Использование кресла-коляски МЕТ МК-300 противопоказано при:

- невозможности сохранять сидячее положение;
- тяжелых нарушениях вестибулярного аппарата;
- потере функциональности органов на обеих руках;
- психических расстройствах;
- ограниченной или недостаточной способности к ориентации;
- наркотическом или алкогольном воздействии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию и конструкцию кресла-коляски без предварительного уведомления.

3. Требования безопасности

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски.

- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на инвалидную коляску повышается опасность опрокидывания.
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы.
- При посадке и высадке с кресла-коляски для инвалидов МЕТ МК-300 колеса необходимо поставить на тормоза.
- При посадке и высадке не наступайте на опоры для ног.
- При наклоне кресла-коляски на угол более 10 градусов имеется опасность опрокидывания назад.
- При движении без торможения в направлении препятствия (ступенька, бордюр и т.п.) имеется опасность выпадения человека из коляски вперед.
- Запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.
- При движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения.

4. Эксплуатация кресла-коляски

Посадка и высадка спереди:

- Поставьте кресло на стояночный тормоз.
- Сложите вверх опору для стоп.
- При помощи сопровождающего лица переместите пациента.
- Опустите опоры стоп и поставьте на них ноги.
- Пристегните ремень безопасности

Складывание и раскладывание:

Кресло-коляска для инвалидов МЕТ МК-300 складывается и раскладывается без инструмента.

Складывание (Рис.1) и раскладывание (Рис.2) кресла-коляски для инвалидов МЕТ МК-300 производится по вертикальной оси.

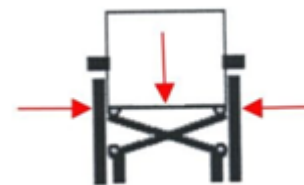


Рис.1

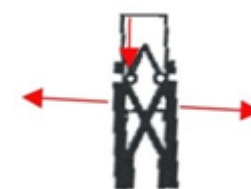


Рис.2

5. Транспортировка:

- Кресло-коляска удобно складывается и занимает мало места.
- Нельзя использовать в качестве сиденья в автомобиле.

6. Рекомендации по уходу:

- При эксплуатации кресло-коляска для инвалидов МЕТ МК-300 требует определенного технического ухода.
- Обивку сиденья, спинки и подлокотники необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств.
- Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.
- Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения.
- Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

7. Технические характеристики

Длина в рабочем состоянии, мм	990
Ширина в рабочем состоянии, мм	680
Ширина в сложенном состоянии, мм	280
Высота, мм	880
Ширина сиденья, мм	460
Глубина сиденья, мм	430
Высота сиденья, мм	440
Вес нетто, кг	13
Грузоподъемность, кг	130
Диаметр задних колес, мм	610
Диаметр передних колес, мм	170

8. Комплектация

- Кресло-коляска _____ 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации _____ 1 шт.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моём присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель: _____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____