

# Tautmann

Каталка медицинская функциональная

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



\* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия.

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

## Введение

Изделие предназначено для перемещения пациентов между палатами и помещениями в больницах и других лечебных учреждениях.



Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования.

## ВНИМАНИЕ!


Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании изделия важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

### 1. Технические характеристики

Габариты изделия	201 x 75 см
Габариты ложа (HPL-пластик)	193 x 60 см
Толщина матраса	80 мм
Высота ложа	65,5 – 95,5 см
Угол наклона спинной секции	0 - 75°
Тренделенбург / Антитренделенбург	15°/15°
Диаметр колесных опор	200 мм
Диаметр пятого колеса	150 мм
Максимальная распределенная рабочая нагрузка	250 кг

### 2. Регулировки изделия

1.

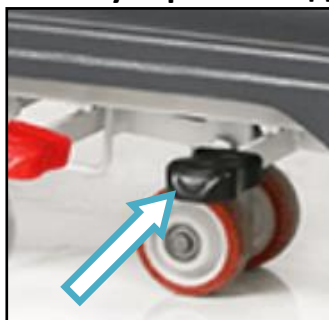

2.



3.



- 1 – Педаль подъема высоты ложа каталки (с каждой боковой стороны)
- 2 – Педаль регулировки угла наклона TR / ATR (при нажатии на обе педали – опускает ложе изделия)
- 3 – Билатеральная педаль блокировки колёс каталки

### 3. Боковые ограждения



Боковые ограждения фиксируются в поднятом положении. Переместите фиксатор вниз для разблокировки и отпустите боковое ограждение, оно плавно опустится само.

Чтобы снова установить боковое ограждение в поднятое положение, поднимите его вверх до щелчка.

#### 4. Правила эксплуатации

Не вносите изменения в конструкцию изделия и не устанавливайте на него никаких деталей, не предусмотренных производителем.

**Перед каждым использованием изделия убедитесь, что:**

- места вокруг изделия достаточно для регулировок;
- боковые ограждения беспрепятственно поднимаются и опускаются;
- механизм блокировки боковых ограждений функционирует;
- провода других приборов не должны попадать под колеса или в конструкцию изделия.

**В процессе эксплуатации изделия:**

- не допускайте зажимания его элементами пациента или других лиц;
- если изделие перемещается вместе с пациентом, боковые ограждения обязательно должны быть подняты и зафиксированы;
- во время регулировок изделия колеса должны быть заблокированы;
- не оставляйте пациента на изделии без присмотра!



**При нарушении функционирования изделия прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.**

#### 5. Техническое обслуживание и уход

- 5.1. Периодически или при необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, проверяйте и подтягивайте ослабленные винтовые соединения.
- 5.2. Регулярно проверяйте изделие на отсутствие изношенных или поломанных деталей, следов коррозии, а также целостность покрытия.



Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

#### 6. Транспортировка и хранение

- 6.1. Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотопливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта. При транспортировке изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
- 6.2. Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5°C до +40°C при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 °C и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металлов.

#### 7. Комплектация

- Каталка медицинская функциональная – 1 шт.
- Матрац по размеру ложа, зафиксированный на липучках – 1 шт.
- Штатив для инфузионных вливаний – 1 шт.

#### 8. Гарантия

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

**Гарантия не распространяется на следующие неисправности:**

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному паспорту изделия, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель \_\_\_\_\_

Срок гарантии: \_\_\_\_\_ 12 месяцев \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ М.П.

Продавец: \_\_\_\_\_

**Информация о производителе, месте производства и гарантийном обслуживании:**

Каталка медицинская функциональная Tautmanns принадлежностями;  
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13313 от 05.12.2012 года

Срок службы изделия – не менее 5 лет

Производитель: КББ ОЗЕЛ САГЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ВЕ ТЫББИ ДАНЫШМАНЛЫК ТИДЖ. ВЕ САН. А.Ш., ТУРЦИЯ.

Место производства: KBB QZEL SAGLIK HIZMETLERI VE TIBBI DANISMANLIK TIC. VE SAN. A.S., Konya Devlet Karayolu 29. km.  
Serpmeevler Yolu No:337 Oglubey Golbaşı 068 30 ANKARA, Turkey.

Сервисный центр: ООО «МЕТ», 142784, Город Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), домовлад. 4, стр.2, эт.5, блок Г  
На расходные материалы гарантийные обязательства не распространяются.  
Телефон сервисной службы: (495) 775-75-95, +7 (903) 775 15 51