

ПАСПОРТ (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

Тележка медицинская МЕТ



Комплектации моделей:

Комплектность модели:	Габаритные размеры, мм:	Опции:	Характеристики
<p>МЕТ SPY-120: 2 полки, 2 ящика</p>	<p>Длина: 705 Ширина: 455 Высота: 905</p>	<p>2 полки 2 выдвижных ящика (опционально) Пластиковое ведро (опционально)</p>	<p>Пластиковые ограждения с трёх сторон полок, Выпрессованная отбортовка каждой полки, Опорные колеса d = 75мм, Две индивидуальных тормозных опоры, Распределённая нагрузка на каждую полку: 15 кг</p>
<p>МЕТ SP-140: 2 полки</p>			
<p>МЕТ SPY-120: 2 полки, 2 ящика, ведро</p>			
<p>МЕТ SP-150: 3 полки</p>	<p>Длина: 705 Ширина: 455 Высота: 920</p>	<p>3 полки 2 выдвижных ящика (опционально) Пластиковое ведро (опционально) Корзина (опционально)</p>	
<p>SPY-130: 3 полки, 2 ящика, ведро</p>	<p>Длина: 705 Ширина: 455 Высота: 980</p>	<p>3 полки 2 выдвижных ящика (опционально) Пластиковое ведро (опционально) Корзина (опционально)</p>	

<p>МЕТ SP-140: 2 полки, 1 ящик</p>	<p>Длина: 590 Ширина: 370 Высота: 900</p>	<p>2 полки 1 выдвижной ящик (опционально)</p>	<p>Пластиковые ограждения с трёх сторон полок, Выпрессованная отбортовка каждой полки, Опорные колеса d = 75мм, Две индивидуальных тормозных опоры, Распределённая нагрузка на каждую полку: 15 кг</p>
<p>МЕТ SPY-130: 3 полки, 2 ящика, 2 ведра, корзина</p>	<p>Длина: 700 Ширина: 450 Высота: 910</p>	<p>3 полки 2 выдвижных ящика (опционально) Пластиковое ведро (опционально) Корзина (опционально)</p>	

1. Предназначение

Тележка медицинская, предназначена для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях.

2. Общая характеристика

Тележка состоит из:

- корпуса с боковой ручкой
- полок с выпрессованной отбортовкой и ограждениями с трёх сторон
- четырехколесной опоры, с тормозами-фиксаторами на 2 колесах

3. Описание

Каркас: ABS-пластик на пластиковом каркасе. Тележка установлена на четырех поворотных колесных опорах медицинской серии из немаркой резины диаметром 75 мм.

Топ выполнен из объёмноформированного ABS -пластика с выпрессованной 4-сторонней отбортовкой, высокие пластиковые ограждения с трёх сторон.

Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка, хранение

Тележка обернута полиэтиленовой плёнкой и упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.

Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5°C до +40°C при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 °C и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Уход

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости), но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивать ослабленные винтовые соединения.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Сборка

Тележка поставляется в разобранном виде.

Пожалуйста, собирайте изделие в соответствии с данной инструкцией.

Шаг 1: Распаковка

Достаньте изделие из упаковки и положите его на заранее подготовленный картон, ветошь и т.д. на полу.



Шаг 2: Сборка П-образных каркасов для полок

Вставьте трубки в технологические отверстия втулок. В итоге должен получиться П-образный каркас. Обратите внимание, что технологические отверстия на втулках должны располагаться на одной высоте.



Шаг 3: Установка боковой ручки и верхней полки


Проденьте ручку и заглушки с резьбой через втулки.

На полученную конструкцию установите полку (резьба должна пройти насквозь).



Шаг 4: Установка трубок каркаса

Вкрутите трубки каркаса в резьбовые соединения.

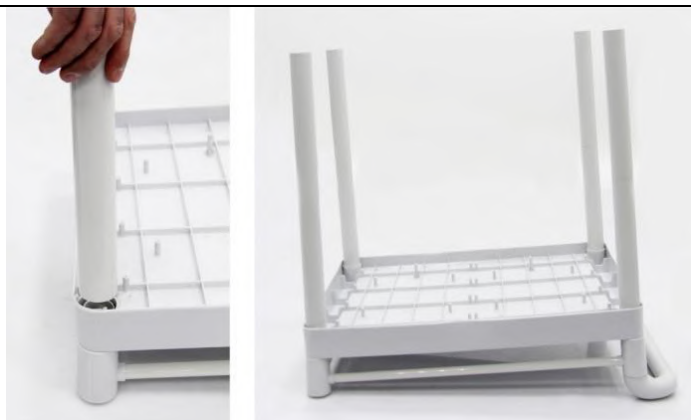

<p>Шаг 5: Установка соединительных муфт</p> <p>Вкрутите соединительные муфты с обратных сторон трубок каркаса.</p>	
<p>Шаг 6: Установка нижней полки</p> <p>Наденьте П-образный каркас на трубки каркаса.</p> <p>Установите вторую полку.</p>	
<p>Шаг 7: Колеса</p> <p>Вкрутите колеса в резьбу соединительных муфт</p>	
<p>Шаг 8: Установить ящики.</p> <p>Вставьте ящики в пазы под верхней полкой.</p>	

7. Гарантия

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель: _____

Срок гарантии: 12 месяцев

Дата продажи: _____ М.П.

Продавец: _____

*Тележка медицинская BLQ 008, регистрационное удостоверение РЗН 2016/4343 от 05 июля 2016 года;
гарантийный срок – 12 месяцев.*

*Производитель :«Цзянсу Юнфа Медикал Экуипмент Ко., Лтд.», Кунтай, Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co.,
Ltd, Zhaofeng Industrial Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City, China*

*Место производства: Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co., Ltd, Changfeng village, Leyu Town, 215622
Zhangjiagang, Jiangsu Province, China*

*Сервисный центр: ООО «МЕТ»
142784, Город Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), домовлад. 4, стр.2, эт.5, блок Г
Телефон сервисной службы: (495) 775-75-95, (495) 126-92-79*