

Трости опорные серии С, с принадлежностями:

- Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения, варианты исполнения: С Touch.
- Трость опорная, с функцией по регулированию высоты, без устройства противоскольжения, варианты исполнения: С Standart, С Fold, С Hook, С Soft, С Comfort.
- Трость 3-опорная с функцией по регулированию высоты, без устройства противоскольжения, варианты исполнения: С Delta.
- Трость 4-опорная с функцией по регулированию высоты, без устройства противоскольжения, варианты исполнения: С Qlever (размеры S, L), С Pyramid.



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
4 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С Qlever.....	5
5 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	6

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик тростей опорных C Standart, C Delta, C Qlever, C Pyramid, C Touch, C Fold, C Hook, C Comfort, C Soft. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Трости опорные серии C являются медицинским изделием, предназначенным для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.

Квадратная опора в моделях C Delta, C Qlever, C Pyramid служит для увеличения устойчивости и используется людьми с нарушенной координацией.

1.2 Технические характеристики

Для получения более подробных характеристик стоит обратиться к сайту: sims2.ru.

Характеристика	Описание	Артикул
материал	алюминий	все модели
рукоятка	резиновая с обмягчением	C Qlever, C Soft
	пластиковая	C Standart, C Delta, C Pyramid, C Touch, C Fold, C Hook, C Comfort
особенность	квадратная опора	C Qlever, C Pyramid
	основа на 3-х ножках	C Delta
производство	Китай, Армения	все модели
гарантия	6 месяцев	все модели

1.3 Упаковка

Комплектация: трость, руководство по эксплуатации

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка на трость C Standart, C Soft, C Hook, C Comfort - 100 кг
- Максимальная нагрузка на трость C Touch, C Fold, - 80 кг
- Максимальная нагрузка на трости C Delta, C Qlever, C Pyramid - 110 кг.

2.2 Порядок работы

1. Трости продаются в собранном виде.
2. При регулировании высоты трости убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.
3. Соблюдать особенности использования C Qlever

3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. Особенности использования C Qlever



Кнопка-фиксатор для
регулировки высоты

Винт типа
"Барашек" для
зажима



ВНИМАНИЕ

Запрещено затягивать винт "барашек" в процессе регулировки высоты. Регулировку высоты производить в ослабленном состоянии винта "барашек"

Запрещается использовать винт "барашек" в качестве фиксатора высоты

5. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Артикул № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/ 10856 от 13.09.2019



Трости опорные C Standart, C Delta, C Qlever, C Pyramid, C Touch, C Fold, C Hook, C Comfort, C Soft.

Производитель: Гуандун Дайанг Медикал Технолоджи Ко., Лтд., Китай.

Место производства: Гуандун Дайанг Медикал Технолоджи Ко., Лтд., Китай

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Артикул №	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Для заметок