



Поручни для ванны  
Руководство по эксплуатации

Модели:

10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405



## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	4
4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	7

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик поручней для ванны моделей: 10400; 10401; 10402; 10403; 10404; 10405.

Перед использованием проверьте изделие на наличие повреждений.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение

Поручни для ванны являются страховочным элементом при перемещении людей с нарушенной координацией движений.

### 1.2 Технические характеристики

Модель 10400.

- Поручень для ванн с универсальным креплением.
- Материал: ударопрочный, гигиенический пластик.
- Двойная эргономичная ручка.
- Крепление на стенку ванны при помощи зажимов-фиксаторов.
- Регулируемая ширина крепления для различной ширины ванн 9 - 16,5 см.
- Регулировка ширины крепления с помощью барашкового зажима.
- Противоскользящее покрытие на внутренних стенках зажимов-фиксаторов.
- Вес: 1,8 кг.
- Максимальная нагрузка: 100 кг.
- Производство: Тайвань (Китай).
- Гарантия: 6 месяцев.

Модели: 10401, 10402, 10403, 10404, 10405.

- Поручень настенный для ванн.
- Материал: ударопрочный, гигиенический пластик.
- Крепление с помощью 3-х шурупов с каждой стороны.
- Крепёжная часть диаметром 85 мм.
- Декоративная накладка на крепёжную часть.

- Расстояние от трубки до стены: 5 см.
- Длина: 10401 - 31 см; 10402 - 41 см; 10403 - 48 см; 10404 - 61 см; 10405 - 81 см.
- Максимальная нагрузка: 115 кг.
- Производство: Тайвань (Китай).
- Гарантия: 6 месяцев.

### 1.3 Упаковка

В комплект к моделям:

- 10400 входят: поручень для ванны, барашковый зажим;
- 10401, 10402, 10403, 10404, 10405 входят: декоративная панель на крепления, шурупы размером 5x35 мм.

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

- Протрите изделие мягким моющим средством и водой, затем тщательно высушите.
- Убедитесь, что все детали надежно закреплены.

### 2.2 Порядок работы.

Перед использованием проверьте элементы изделия на наличие дефектов и повреждений.

Модель 10400: установите поручень для ванны на борт ванны и зафиксируйте, закрутив барашковый фиксатор.

Модели: 10401; 10402; 10403; 10404; 10405: сделайте дырки в стене, в том месте, где будет закреплен поручень. Закрепите шурупами. Убедитесь, что используете дюбели, которые подходят именно для вашего типа стен. Дюбели в комплект не входят и подбираются в зависимости от материала стены, на которой будет прикреплен поручень.

## 3. Техническое обслуживание

После вскрытия упаковки проверьте изделие на наличие поломок, и повреждений. В случае их обнаружения обратитесь к продавцу или дилеру данного изделия.

## 4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Свободы, д.35, стр.5  
Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати,  
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Поручни для ванны, модели: 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405.

Производитель: Valentine International Ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

\*Более подробная информация на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)