



Защитный чехол от воды

60780/R, 60781/R, 60783/R, 60784/R,
60785/R, 60786/R, 60787/R, 60788/R,
60789/R, 60790/R



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик защитных чехлов от воды 60780/R, 60781/R, 60783/R, 60784/R, 60785/R, 60786/R, 60787/R, 60788/R, 60789/R, 60790/R. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Защитный чехол от воды предназначен для защиты верхних и нижних конечностей при принятии ванны или душа.

1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
материал	пластик, винил	все модели
предназначение	для взрослых, кисть	60780/R
	для взрослых, рука	60781/R, 60783/R
	для взрослых, стопа	60784/R
	для взрослых, нога	60785/R, 60786/R
	для детей, рука	60787/R, 60788/R
	для детей, нога	60790/R
производство	Тайвань (Китай)	все модели

60780/R Защита от воды - кисть 12" для взрослых 30 см.

60781/R Защита от воды - рука 22" для взрослых 55 см.

60783/R Защита от воды - рука 39" для взрослых 98 см.

60784/R Защита от воды - стопа 11" для взрослых 28 см.

60785/R Защита от воды - нога 23" для взрослых 58 см.

60786/R Защита от воды - нога 42" для взрослых 105 см.

60787/R Защита от воды - рука 18" для детей 45 см.

60788/R Защита от воды - рука 22" для детей 55 см.

60789/R Защита от воды - нога 18" для детей 45 см.

60790/R Защита от воды - нога 31" для детей 78 см.

1.3 Упаковка

Комплектация: защитный чехол от воды, руководство по эксплуатации

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Не используйте защитное изделие в бассейнах или на открытой воде
- Во избежание попадания воды, не погружайте защитное изделие целиком в воду
- Убедитесь, что защитное изделие не слишком плотно прилегает к конечностям. Это может привести к нарушению кровообращения
- При возникновении отеков или дискомфорта в конечностях проконсультируйтесь с врачом.

2.2 Порядок работы

1. Крепко удерживайте пластиковое кольцо при надевании на повязку или шину;
2. Для обеспечения надежной защиты от проникновения воды убедитесь, что защитная поверхность изделия достаточно плотно прилегает и покрывает всю поверхность повязки или шины;
3. Убедитесь, что перед снятием изделия диафрагма защитного изделия высушена;
4. При снятии крепко удерживайте пластиковое кольцо.
 - Не тяните за пластиковый мешочек, это может повредить изделие
 - Изделие предназначено только для индивидуального использования

3. техническое обслуживание

Протирайте сухим полотенцем после каждого использования.

4. условия гарантии

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати,
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Защитный чехол от воды 60780/R, 60781/R, 60783/R, 60784/R, 60785/R,
60786/R, 60787/R, 60788/R, 60789/R, 60790/R

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская, д. 16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Телефон: +7 (495) 792-31-90

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

Декларация о соответствии № РОСС ТW.АГ66.Д05788

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru