

Кресло для купания детей с ДЦП



Содержание

Важная информация	3
Описание	4
Показания и противопоказания	5
Технические характеристики	6
Аксессуары	7
Конструктивные особенности	8
Правила использования	9
Принципы безопасности	10

ВАЖНО



Пожалуйста, сохраните это руководство по эксплуатации на время использования изделия.

Перед использованием изделия пользователь обязан ознакомиться с этой инструкцией. Пожалуйста, помните о том, что применение продукта согласно рекомендациям, содержащимся в инструкции, позволяет безопасно его использовать и способствует сохранению его прочности и внешнего вида.

Производитель несет ответственность за правильное функционирование изделия исключительно в случае покупки его у квалифицированного сотрудника фирмы «АРКАНУМ» или в специальном магазине медицинских изделий, являющимся официальным дистрибьютором компании. Производитель оставляет за собой право введения технических и коммерческих изменений в содержание инструкции без предварительного предупреждения.

Описание

Кресло ЛОТУС - это изделие для соблюдения личной гигиены в ежедневном уходе за детьми с ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательной системы. Благодаря нашему изделию ребенок во время купания чувствует себя безопасно, так как риск повреждений практически исключен и родитель легко может самостоятельно купать ребенка. Благодаря стабильному и комфортному положению ребенок на много легче переносит купание. Лежанка сделана из алюминиевых трубок, с дополнительной защитой, благодаря чему изделие устойчиво к воздействию воды и коррозии от нее. Лежанка для купания оптимально подходит особенным детям, позволяя принять удобное положение сидя или лежа. Можно регулировать угол наклона четырех сегментов: подножки, сидения, спинки, подголовника.

Обивка лежанки сделана из водонепроницаемой сетки, которая пропускает воду. Изделие оснащено регулируемым подголовником, поясным ремнем для туловища и фиксаторами для ножек ребенка, защищающими от последствий неконтролируемых движений. Конструкция изделия позволяет легко использовать его в любой стандартной ванне и оптимально подходит для каждого ребенка. Натяжку обивки можно регулировать с помощью задних ремней на липучках. Верхняя часть лежанки дополнительно наклоняется - это облегчает мытье головы ребенка. В тех местах, где лежанка соприкасается со скользким дном ванны или кафелем, применены защитные мягкие накладки из пенки во избежание передвижений изделия во время использования и с целью защиты ванны от царапин и других механических повреждений.

Показания и Противопоказания

Показания:


- Детский церебральный паралич;
- Мышечная дистрофия;
- Расщелина позвоночника;
- Дегенерация, деформации конечностей или повреждения суставов;
- Гемиплегия;
- Параплегия (обычно - нижних конечностей);
- Двусторонний паралич, парез;
- Квадриплегия, тетрапарез (охватывающая весь организм: голова, туловище и конечности).

Противопоказания:

Неправильное размещение пользователя в кресле может привести к деформации суставов, а длительное удержание человека в одном положении значительно увеличивает риск возникновения пролежней.

Нужно обязательно обратить внимание на максимальный вес пользователя для каждого размера, который указан в инструкции.

Технические Характеристики

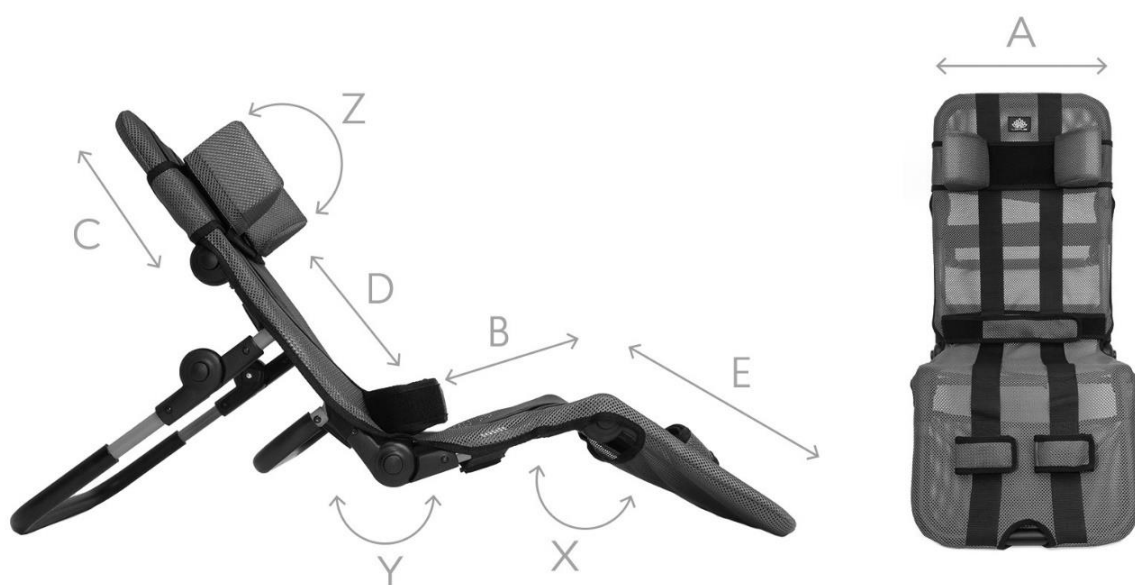

Карта размеров	Размер 1	Размер 2	Размер 3
Ширина (A)	40 см	40 см	45 см
Полезная ширина	31 см	31 см	36 см
Глубина сидения (B)	25 см	28 см	33 см
Высота подголовника (C)	22 см	26 см	30 см
Высота спинки (D)	33 см	37 см	43 см
Высота подножки (E)	28 см	31 см	36 см
Глубина сиденья с подножкой (B+E)	53 см	59 см	69 см
Высота спинки с подголовником (C+D)	55 см	63 см	73 см
Угол наклона подножки (X)	90 – 180 °	90 – 180 °	90 – 180 °
Угол наклона спинки (Y)	90 – 180 °	90 – 180 °	90 – 180 °
Угол наклона подголовника (Z)	144 – 234 °	144 – 234 °	144 – 234 °
Макс. вес пользователя	30 кг	30 кг	45 кг
Вес изделия	3 кг	4 кг	4,5 кг

Аксессуары



Подголовник на ремне-липучке

Можно расположить на любой высоте спинки для правильного позиционирования и безопасности

Фиксаторы для ног

Каждая нога фиксируется отдельно при помощи ремней на липучках





Поясной ремень

Нужен для пользователей, которые не в состоянии поддерживать равновесие туловища

Конструктивные особенности

Лежанка не требует инструментов для осуществления настроек, многие из которых возможны в процессе использования.

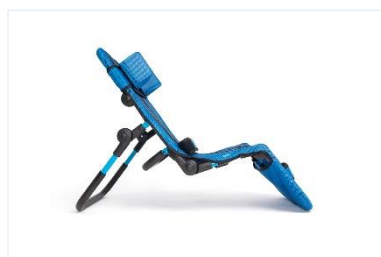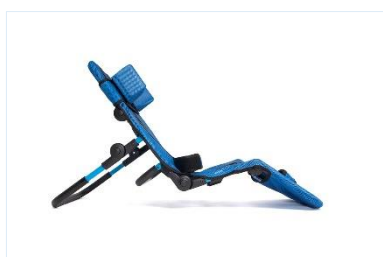

Компактно складывается для удобства транспортировки и хранения.



Правила использования



Кресло для купания ЛОТУС следует использовать согласно рекомендациям настоящей инструкции, только в присутствии подготовленного сопровождающего. Каждый раз следует настроить изделие и подготовить пациента!

Для правильного пользования изделием, следует:

- Разложить изделие;
- Установить кресло на ровной поверхности без наклонов, имея к нему свободный доступ;
- Убедиться, что все части исправны и правильно закреплены и стабильны;
- Приспособить лежанку и стабилизатор головы к размерам ребенка;
- Отстегнуть ремень стабилизирующий туловище и ремни стабилизирующие ноги пациента;
- Поместить пациента на лежанке и закрепить ремнями для фиксации.

Изделие будет правильно выполнять свою функцию только тогда, когда оно соответствует росту и весу тела пациента, на это следует обратить внимание при покупке в первую очередь. Главным принципом системы для купания ЛОТУС является чувство безопасности и комфорта.

Перед тем, как приступить к использованию кресла, следует убедиться в том, что все ремни и защиты правильно отрегулированы и застегнуты!

Принципы безопасности

Перед тем, как купить лежанку ЛОТУС следует посоветоваться с врачом специалистом или реабилитологом на счет правильного подбора лежанки и ее размера.

Каждый раз перед использованием следует ознакомиться со всеми указаниями этого руководства:

- Проверить изделие на наличие видимых повреждений или других браков, создающих преграды для безопасного использования. Проверить исправны ли все элементы, правильно ли установлены. Нет ли следов трещин или каких-либо деформаций изделия;
- Проверить, не расслабились ли шурупы, гайки и другие винтовые, клееные, шитые соединения;
- Проверить состояние пряжек;
- Всегда использовать стабилизирующие ремни, липучки на них должны находить друг на друга минимум на 8 см;
- Приспособить изделие к размерам и нуждам пациента;
- Стабилизировать пациента с помощью подголовника, ремней для туловища и ног. Это должно защитить пациента от выпадения или выскальзывания;
- Запрещается использовать лежанку не по назначению;
- Запрещается пользоваться лежанкой, если она повреждена или не хватает какой-либо ее части;
- Запрещается оставлять пациента на лежанке без присмотра взрослого;
- не использовать лежанку в отсутствие подготовленного опекуна или медперсонала

