



Костыли: Костыли локтевые:

арт.10071, арт.10074, арт.10074/У, арт.10075,  
арт.10075/У, арт.10076, арт.10076/У, арт.10079,  
арт. 10081

Принадлежности к костылям:

арт. 10030 – Резиновая насадка для костылей.  
арт. 10031 – Резиновая насадка для костылей.

Руководство по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	5
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик костылей локтевых 10072, 10074, 10075, 10076, 10079, 10081.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

## 1. описание и работа

### 1.1 Назначение

Предназначен для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.



10072



10074



10075



10076



10081



10079

## 1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
материал	алюминий	все модели
рукоятка	пластиковая	10072, 10074, 10075, 10076
	пластиковая со светоотражателем	10079
	пластиковая анатомическая	10081
локтевая манжета	виниловая откидная	10072
	виниловая регулируемая по высоте	10074, 10075, 10076, 10081
	пластиковая фиксированная	10079
особенность	пирамидальная основа	10072
производство	Тайвань (Китай)	все модели
гарантия	6 месяцев	все модели

## 1.3 Упаковка

Комплектация: костыль, руководство по эксплуатации

## 2. использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка на костыль 10079 - 100 кг; на оставшиеся модели - 125 кг

### 2.2 Порядок работы

1. Костыли продаются в собранном виде.
2. При регулировании высоты костыля убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

Модели 10074/U, 10075/U, 10076/U, 10079/SL/U - со встроенным УПС.

### 3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насаки в случае необходимости.

### 4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

\_\_\_\_\_  
(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Костыли локтевые 10072, 10074, 10075, 10076, 10079, 10081

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90.

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

\* \*Более подробная информация на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)