

**Производитель:** Xiamen Senyang Co., Ltd., 4-5 Floor, Xingbei Industry, No. 95-99, West 2 Road, Jiu Tianhu, Xinglin Xiamen, 361000 Fujian, China

**Импортер:** ООО «Реамед»

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6844 от 15 февраля 2018 года.

Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет: ООО «Реамед»

Адрес: 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т 11.

Тел: 8 (800) 707-44-52



Подушка противопролежневая с надувными ячейками **Ortonica Easy Pad E80**

### Гарантийный талон

Наименование изделия: Подушка противопролежневая с надувными ячейками Ortonica Easy Pad E80

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.


Срок гарантии: 12 месяцев

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Сервисное обслуживание производится в ООО "Реамед"

Контактный телефон: 8 (800) 707-44-52

Адрес: 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т, 11.

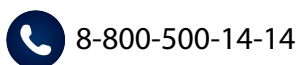

**Паспорт изделия**

## Назначение

Противопролежневая подушка Ortonica Easy Pad E80 выполнена из мягкой непромокаемой ткани. Для придания формы, подушку необходимо наполнить воздухом. Изделие предназначено для использования в инвалидной коляске, а также на рабочем кресле при сидячей работе, когда необходимо снимать нагрузку с позвоночника.

## Конструкция

- Подушка выполнена в виде соединенных валиков, благодаря которым обеспечивается правильное распределение массы и поддержка тела. Подушка выдерживает до 120 кг.
- Подушка выполнена из мягкого приятного к телу бархатистого материала, который препятствует соскальзыванию изделия с кресла или стула. При этом материал прочный и влагоустойчивый.
- Для придания упругой формы, изделие нужно наполнить воздухом. Это занимает немного времени и осуществляется при любых условиях. Подушку можно брать с собой в путешествия.

## Технические характеристики

Размер: 43х43х6,5 см  
Вес нетто: 0,4 кг  
Грузоподъемность: 120 кг  
Материал: флокированная ткань с ПВХ

## Комплект поставки

Противопролежневая подушка Ortonica Easy Pad E80 – 1 шт.  
Ручной насос - 1 шт.  
Паспорт – 1 шт.

## Меры безопасности

- Запрещается держать подушку вблизи с нагревательными приборами;
- Не рекомендуется попадание прямых солнечных лучей;
- При попадании какой-либо жидкости, необходимо, по возможности, быстро очистить подушку;
- Запрещается стирать подушку в стиральной машине;
- Храните подушку вдалеке от острых предметов
- Не превышайте лимит по грузоподъемности подушки  
Не используйте поврежденную подушку
- Перед тем, как сесть на подушку, убедитесь, что на ней нет посторонних предметов.

## Подготовка к эксплуатации

1. Положите противопролежневую подушку на гладкую ровную поверхность и выровняйте все воздушные секции подушки
2. Накачайте подушку с помощью ручного насоса
3. Закройте воздушный клапан

## Уход и обслуживание

- Храните подушку в сухом месте.
- Протирать подушку необходимо мягкой тканью с помощью мягких моющих средств. Использование моющих средств, содержащих в составе красители запрещено.
- Очистку и дезинфекцию матраса необходимо производить только в накачанном виде.
- Регулярно проверяйте трубки для воздуха на наличие повреждений

## Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- проколы, сколы и поломки изделия в результате сильных ударов о другие предметы;
- нарушение правил эксплуатации противопролежневой подушки и насоса